



## Montage / Aufbauanleitung

- L-Bügel 1 + 2 werden mit dem Vierkanthrohr 3 verbunden
- Einhängeplatte 5 ( für den Badelift ) wird mit 5 Senkschrauben an den L-Bügel 1 oder 2 geschraubt ( Links oder Rechtsausstieg )
- Auf der gegenüberliegenden Seite wird die Einhängeschiene 4 auch mit 5 Senkschrauben auf den Bügel 1 oder 2 geschraubt. ( Links oder Rechtsausstieg )
- Den Rahmen auf den ca. 5 cm breiten Badewannenrand auflegen und Bügel 1 und 2 nach aussen drücken bis die beiden abgewinkelten Nasen von 4 und 5 an der Innenwand der Badewanne anliegen.
- Die 6 Madenschrauben von Verbindungsrohr 3 nun anziehen.
- Es ist vor Nutzung zu prüfen ob der Rahmen auch richtig aufliegt.
- Nun kann der Badelift in die Platte 5 eingehängt werden.
- Sie fahren das Band aus ( bitte beim Aus,-bzw. Einfahren des Bandes immer mit der Hand auf etwas Zug halten damit es sauber Ein und Ausfährt )  
Soweit ausfahren, bis Sie das Band in die Einhängeschiene von unter her einhängen können.
- Jetzt nur noch über den Motor aufrollen und spannen FERTIG

